

Калібратор HDL / LDL CAL



Лише для *in vitro* діагностики.

Кат. №	Назва	Фасування
XSYS0061	ЛПВП/ЛПНП КАЛ	2 x 1 мл

ЗАСТОСУВАННЯ

Калібратор HDL / LDL CAL призначений для кількісного визначення ЛПВЩ- (HDL-) та ЛПНЩ- (LDL-) холестеринів з використанням реагентів прямого (direct) визначення ЛПВЩ та ЛПНЩ.

ПРИПИСАНІ ЗНАЧЕННЯ

Номер партії	Термін придатності	Аналіт		
		Аналіт	Концентрація	
xxxxxxxxx	mm/yyyy	HDL (ЛПВЩ)	xx,x мг/дл	x,xxx ммоль/л
		LDL (ЛПНЩ)	xxx,x мг/дл	x,xxx ммоль/л

КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕРАХУНКУ

мг/дл x 0,026 = ммоль/л

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Калібратори у невідкритих флаконах є стабільними до вичерпання терміну придатності, вказаного на етикетці, за умови зберігання за температури 2–8 °С.

Відновлений калібратор є стабільним упродовж 6 днів за умови зберігання за температури 2–8 °С.

ВІДНОВЛЕННЯ КАЛІБРАТОРА

Флакон з калібратором обережно відкрити, уникаючи втрати ліофілізату, додати точно 1,00 мл деіонізованої води. Закрити флакон і обережно перемішувати круговими рухами до повного розчинення ліофілізату. Уникати появи піни. Не струшувати!

Перед використанням залишити на 30 хвилин за кімнатної температури.

Відновлений калібратор зберігати за температури 2–8 °С.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Біологічний матеріал, з яких виготовлений калібратор, був перевірений на відсутність антител до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), до вірусу гепатиту С (HCV) і поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HbsAg).


Оскільки неможливо повністю виключити присутність патогенних матеріалів, з набором необхідно поводитися таким же чином, що й з інфекційним матеріалом.

UA

Уповноважений представник
в Україні: Пашкевич А.П.
Київ, вул.Китаївська 14-16, кв.12
Тел.+38-067-2097051
pashkevich@lachema.com.ua

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

LOT Номер партії	IVD In vitro діагностика	Перед використанням уважно вивчіть інструкцію
REF Каталогний номер	Виробник	CONT Вміст
Термін придатності	Температура зберігання	Національний знак відповідності для України

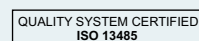

Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbamannheim.com

N/43/19/J/INT

Date of Revision: 11. 7. 2019

ЭРБА ЛПВП / ЛПНП Калибратор



Только для *in vitro* диагностики.

Кат.№	Фасовка
XSYS0061	2 x 1 мл

НАЗНАЧЕНИЕ

ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП/ЛПНП КАЛИБРАТОР предназначен для количественного определения ЛПВП и ЛПНП холестерина, с использованием наборов Холестерин - ЛПВП/ЛПНП Прямой.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП/ЛПНП КАЛИБРАТОР - лиофилизированная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Лот калибратора	Срок годности	Концентрация		
		Параметры		
xxxxxxxxx	mm/yyyy	ЛПВП	xx,x мг/дл	x,xxx ммоль/л
		ЛПНП	xxx,x мг/дл	x,xxx ммоль/л

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕРАСЧЕТА

мг/дл = 0,026 ммоль/л

ФАСОВКА

ЛПВП / ЛПНП КАЛ.; 2 x 1 мл

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Закрытый калибратор стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении при 2–8 °С. Восстановленный калибратор стабилен в течение 6 дней при температуре 2–8 °С.

КАЛИБРАТОР ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Флакон с калибратором очень осторожно открыть, не допуская потери лиофилизата, и добавить к содержимому флакона точно 1 мл бидистиллированной или деионизированной воды. Закрывать флакон и аккуратно перемешать круговыми движениями до полного растворения лиофилизата. Избегать вспенивания. Не встряхивать. Перед использованием дать постоять 30 мин при комнатной температуре (+20–+25) °С в темном месте. Хранить восстановленный калибратор при 2–8 °С.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Меры предосторожности

Набор калибраторов предназначен для *in vitro* диагностики профессионально обученным лаборантом. Биологический материал, используемый в производстве калибратора, проверен на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg), антител к вирусу иммунодефицита человека (HIV) и антител к вирусу гепатита С (HCV). Так как риск заражения нельзя полностью исключить, поэтому работать с калибратором необходимо, как с потенциально инфицированным материалом.

Артикул	Наименование как в РУ	Номер РУ	Дата выдачи РУ
XSYS0061	ЭРБА ЛПВП/ЛПНП Калибратор	ФСЗ 2011/09958	от 14.05.2019

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

REF Каталогный номер	Производитель	Перед использованием внимательно изучайте инструкцию
LOT Номер партии	IVD Ин vitro диагностика	Температура хранения
Срок годности	CONT Содержание	

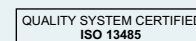

Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbamannheim.com

N/43/19/J/INT

Дата проведения контроля: 11. 7. 2019

12000009

12000009