

ERBA XL AutoWash AC/AL

Кислотний і лужний миючі розчини

Лише для *in vitro* діагностики

Кат. номер	Назва	Фасування
XSYS0082	XL АВТОПРОМИВ АС/АL	АС: 5 x 44 мл, АL: 5 x 44 мл



ЗАСТОСУВАННЯ

ERBA XL AutoWash AC/AL - набір миючих розчинів, призначений для використання під час роботи з біохімічними аналізаторами ERBA XL.

ПРИНЦИП

Продуктивність і правильність отриманих результатів роботи на автоматичних аналізаторах ERBA XL значною мірою залежить від чистоти реакційних мікрокувет. Використання сироватки або плазми крові, а також сечі, призводить до осадження білків на поверхнях мікрокувет. З плином часу це може вплинути на вимірювання і призвести до хибних результатів.

СКЛАД

Розчин АС містить HCl, H₃PO₄, детергент. рН: 1,20 +/- 0,5.

Розчин АL містить NaOH, детергент. рН: 13,1 +/- 0,5.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчини готові до використання.

ЗБЕРЕГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Невідкриті розчини є стабільними до вичерпання вказаного терміну придатності за умови зберігання за температури 15–30 °С.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Розмістити флакони у визначені позиції ротора аналізатора серії XL. Рекомендованою є щоденна промивка аналізатора і заміна розчинів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Лише для *in vitro* діагностики професійно підготовленим персоналом.

Розчини АС та АL класифікуються як корозійно діючі речовини.

Розчин АС містить HCl і H₃PO₄.

Розчин АL містить NaOH.



Небезпека

Позначки небезпеки:

H290 Може спричинити корозію металів.

H314 Спричиняє значні опіки шкіри і ушкодження очей.

Перша допомога:

Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/захисні маски.

P303+P361+P353 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.

P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Ретельно промити водою упродовж декількох хвилин. За наявності і можливості зняти контактні лінзи.

Продовжити промивання.

UA

Уповноважений представник
в Україні: Пашкевич А.П.
Київ, вул.Китаївська 14-16, кв.12
Тел.+38-067-2097051
pashkevich@lachema.com.ua

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ / ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Каталожний номер
Каталожный номер



Номер партії
Номер партии



Термін придатності
Срок годности



Виробник
Производитель



In vitro діагностика
Ин vitro диагностика



Див. Інструкцію користувача
Перед використанням
внимательно изучайте инструкцию



Температура зберігання
Температура хранения



Вміст
Содержание



Національний знак
відповідності для України



Промывочный раствор ERBA XL

Кислотный и щелочной промывочный раствор

Только для *in vitro* диагностики

Кат. №	Фасовка
XSYS0082	R1: 5x44 мл, R2: 5x44 мл



ПРИМЕНЕНИЕ

Промывочный раствор ERBA XL кислотный и щелочной предназначены для применения на автоматических анализаторах, серии ERBA XL.

ОПИСАНИЕ

Воспроизводимость и правильность результатов, полученных на любом автоматическом биохимическом анализаторе, зависит от степени чистоты реакционных кувет. Постоянная работа с образцами сыворотки, плазмы и мочи приводит к загрязнению кувет белковыми компонентами, что в конечном итоге может повлиять на правильность результатов лабораторных исследований.

СОСТАВ РЕАГЕНТОВ

Раствор кислотный содержит: HCl, H₃PO₄, детергент. рН: 1.20 +/- 0.5

Раствор щелочной содержит: NaOH, детергент. рН: 13.1 +/- 0.5

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Готовы к использованию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Установите растворы в соответствующие позиции ротора анализаторов серии ERBA XL. Рекомендуется еженедельная промывка.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Растворы стабильны до окончания срока годности, указанного на флаконе, если хранятся при температуре 15–30 °С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для *in vitro* диагностики профессионально обученным лаборантом.

Растворы кислотный и щелочной классифицируются, как вызывающие коррозию, на основании значения рН.

Раствор кислотный содержит HCl и H₃PO₄

Раствор щелочной содержит NaOH



Опасность

Класс опасности:

H290 Может вызывать коррозию металлов.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Меры предосторожности:

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промойте кожу водой или под душем.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промойте глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Артикул	Наименование как в РУ	Номер РУ	Дата выдачи РУ
XSYS0082	Промывочный раствор ERBA XL	ФСЗ 2011/09043	от 11.01.2017